

Nuevo: +PLUSeries®

# Rápido y de alta resistencia




El adhesivo negro +PLUSeries® Composite 1 Minute pega y repara el carbono y muchos otros materiales.

Especialmente adecuado para pegar bloques de conexión y adaptadores de encaje: **fijo después de 1 minuto, lijable después de 5 minutos, resistencia final después de 15 minutos.**

Pegar y continuar trabajando – el adhesivo +PLUSeries® Composite 1 Minute adecuado para todas las aplicaciones imaginables:

montaje de articulaciones, conexiones de vacío, reparación de modelos de escayola, reparaciones y mucho más.


## Adquiéralo con su próximo pedido!

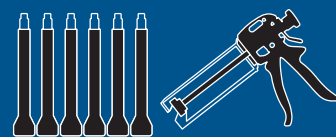


Recibirá en set el adhesivo con dos boquillas mezcladoras.

También disponemos de los accesorios correspondientes, boquillas mezcladoras y pistolas de inyectar.

# Sugerencias y trucos

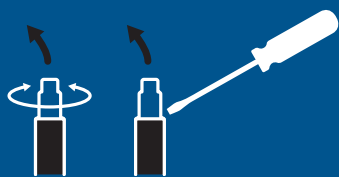


**1** Retirar la tapa del cartucho de 50 ml girándolo y tirando de ella. El cartucho de 220 ml se abre haciendo **palanca en la ranura superior** con un destornillador.

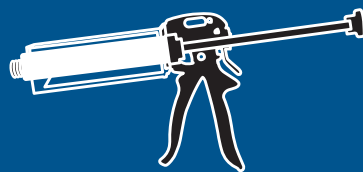

**2** Colocar el cartucho adecuadamente en la **pistola de mezcla**.



**3** **Fijar** las boquillas mezcladoras enroscando el cartucho.

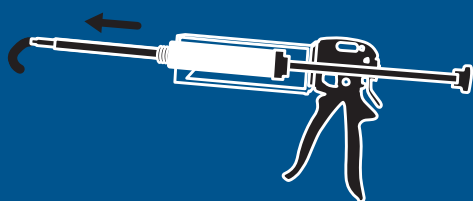

**4** Presionar el adhesivo **a través de la boquilla mezcladora** hasta que salga y eliminar la primera parte del adhesivo filtrado.



**5** Ahora aplicar un **cantidad abundante** del adhesivo sobre el producto a procesar.



**6** Colocar la contraparte dentro del **plazo de procesamiento recomendado**.



**7** Antes de lijar, dejar secar **5 minutos**. Lijar y pulir con las herramientas adecuadas.



**8** Después de **10 a 15 minutos** el adhesivo se puede **cargar completamente**.



## Importante:

- Dejar enroscada al cartucho la **boquilla mezcladora usada**, para que sirva como una tapa nueva hermética.
- El material no endurecido puede limpiarse **con acetona**.
- Usar **guantes**.

Referencia	Descripción
90C4/50	Adhesivo +PLUSerie® Composite 1 Minute, 50 ml
90C4/220	Adhesivo +PLUSerie® Composite 1 Minute, 220 ml
90C5/50	Boquilla mezcladora para el adhesivo +PLUSerie®, 50 ml
90C5/220	Boquilla mezcladora para el adhesivo +PLUSerie®, 220 ml
82E6/50	Pistola de mezcla, 50 ml
90C6/220	Pistola de mezcla, 220 ml